


# Technisches Datenblatt

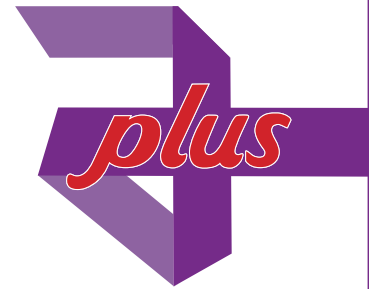

## MaiMed® MyClean AS

### Absauganlagen-Desinfektion

Konzentrat zur Desinfektion von dentalen Absauganlagen

Wirkt bakterizid, levurozid, tuberkulozid und begrenzt viruzid (inkl. HBV/HIV, BVDV (HCV) und Vaccinia-Viren)

- Geprüft nach DGHM-/EN-Richtlinien EN 13624/EN 13727 zur Instrumentendesinfektion
- Wirtschaftlich aufgrund geringer Anwendungskonzentrationen
- Sehr gute Reinigungsleistung
- Sehr gute Materialverträglichkeit
- Angenehmer Geruch, keine schädlichen Emissionen



**Anwendung:** Konzentrat zur effektiven Desinfektion von dentalen Absauganlagen mit und ohne Amalgamabscheider.

**Ausführungen:** MaiMed® MyClean AS – Absauganlagen-Desinfektion

Artikelbeschreibung	Pack-Inhalt	Art.-Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE
Absauganlagen-Desinfektion	5 Liter	79637	4046153116676	10306071	2 Kanister

**Anwendungs-  
konzentration und  
Einwirkzeiten:**

Wirksamkeit gem. EN-Normen und VAH-Richtlinie	
Bakterizid, levurozid, tuberkulozid (M.-terrae) (EN 13624, EN 13727, prEN 14348) (mit Belastung):	2 % – 15 Minuten
Begrenzt viruzid (BVDV (HCV), Vaccinia-Viren (inkl. HBV/HIV) (EN 14476, RKI/DVV) (mit Belastung):	2 % – 15 Minuten

Dosiertabelle:					
fertige Gebrauchslösung (l)	1	2	4	8	10
2,0%ige Lösung (ml)	20	40	80	160	200

**Zusammensetzung:** In 100 g Lösung sind enthalten: Wirkstoff: 7,5 g Dioctyldimethylammoniumchlorid. Weitere Bestandteile: synergistische Additive, Hilfsstoffe, Duftstoffe, Schaumregulatoren.

**Qualitätssicherung:** MPG, Richtlinie 93/42/EWG  
CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen  
CE-Klassifizierung: Klasse IIb  
UFI: 7MF0-7052-T001-984W  
Produktart: Medizinprodukt

**eClass:** 30-30-05-01

**Verwendbarkeit:** 3 Jahre

**Halbbarkeit nach  
Anbruch:**  nach dem Öffnen innerhalb von 12 Monaten verbrauchen.

**Symbole:**



MaiMed® GmbH  
Robert-Koch-Str. 1-7  
29643 Neuenkirchen - Germany

TD-MaiMed® MyClean AS-Absauganlagen-Desinfektion-2021-05