







MaiMed® – MyClean DS OA

Produktbeschreibung	Gebrauchsfertiges, alkoholfreie Lösung zur Desinfektion von wischbeständigen Oberflächen.						
Anwendung	Sichtbare Verschmutzungen vor der Desinfektion entfernen. Oberflächen vollständig mit Mai-Med® MyClean DS OA benetzen und die Desinfektionslösung ggf. mit einem hygienisch, sauberen Einmaltuch verteilen. Dabei die Einwirkzeiten beachten. Während der gesamten Einwirkzeit die Oberfläche feucht halten. Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle überprüfen. Nur für den professionellen Gebrauch						
Auszeichnungen	<div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>						
Ausführungen	Artikelbeschreibung	Duft	Inhalt	Artikelnummer	GTIN	PZN	VE
	Schnell-desinfektion ohne Alkohol	Neutral	500 ml	79712	4046153136896	18844218	18 Flaschen
	Schnell-desinfektion ohne Alkohol	Neutral	1 l	79613	4046153116164	10305769	12 Flaschen
	Schnell-desinfektion ohne Alkohol	Neutral	5 l	79711	4046153126217	15397776	2 Kanister 
	Schnell-desinfektion ohne Alkohol	Neutral	10 l	79614	4046153116188	10305781	1 Kanister
Einwirkzeiten	Wirksamkeit	Belastung		Normen		Einwirkzeiten	
	Bakterizid (mit Mechanik)	hohe Belastung		EN 13727, EN 16615*		1 Minute (VAH 5 Minuten)	
	Bakterizid (ohne Mechanik)	hohe Belastung		EN 13727, EN 1276***, EN13697		1 Minute	
	Levurozid (mit Mechanik)	hohe Belastung		EN 13624, EN 16615*		1 Minute (VAH 5 Minuten)	
	Levurozid (ohne Mechanik)	hohe Belastung		EN 13624, EN1650***, EN 13697		1 Minute	
	Tuberkulozid (M. terrae)	hohe Belastung		EN 14348		1 Stunde**	
	Begrenzt viruzid (Modified Vaccinia Ankara)	hohe Belastung		EN 14476		1 Minute	
	Begrenzt viruzid PLUS (- Adenovirus Typ 5) (- Murines Norovirus)	niedrige Belastung		EN 14476		1 Stunde**	
*an der Tränklösung getestet, **nicht für patientennahe Oberflächen, ***Lebensmittelbereich							
Zusammensetzung	In 100 g Lösung sind enthalten: Wirkstoffe: 0,35 g Alkyl(C12-16)dimethylbenzylammoniumchlorid; 0,25 g N-(3-Aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin; 0,1 g 2-Phenoxyethanol.						
Chemisch-physikalische Daten	Dichte	Aussehen	Flammpunkt	pH-Wert		Viskosität	
	nicht verfügbar	flüssig	> 100 °C	7–9		nicht verfügbar	
Kennzeichnung gemäß CLP-Verordnung	H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. P101: Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P103: Lesen Sie sämtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese. P273: Freisetzung in die Umwelt vermeiden. P501: Inhalt, Behälter einer Sammelstelle für gefährliche Abfälle oder Sonderabfälle zuführen.						



MaiMed® – MyClean DS OA

Qualitätssicherung

EU Medizinprodukte-Verordnung (MDR) 2017/745

Medizinproduktklasse IIa

Desinfektionsprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

VAH

Biozid

BAuA - Registrierungsnummer: N-114461

UFI: 3TU0-305F-9009-7QW2

Verwendbarkeit

3 Jahre / 12 Monate haltbar nach Anbruch. Gebinde nach dem Gebrauch sorgfältig verschließen.

Symbole

