

Technisches Datenblatt

Technical Data Sheet



MaiMed® MyClean S

Feuchttuchspender 3/5 Liter

- Unbefülltes Spendersystem für trockene Vliestuchrolle
- Leichte Handhabung
- Fassungsvermögen: in 3 L und 5 L erhältlich
- Optimal in Kombination mit MaiMed® MyClean Wipes Vliestuchrollen und Produkten der MaiMed® MyClean-Serie

Anwendung: Den MaiMed® MyClean S Feuchttuchspender mit einer Vliestuchrolle MaiMed® MyClean Wipes à 70 Stück (3-Liter Spender) bzw. 90 Stück oder 140 Stück (5-Liter Spender) befüllen und anschließend mit 1,5-2,5 Litern gebrauchsfertiger Desinfektionslösung tränken (Herstellerangaben auf Desinfektionstüchern beachten). Deckel danach gut verschließen. Vor der Verwendung mindestens 30 Minuten durchziehen lassen.

Ausführungen: **MaiMed® MyClean S Feuchttuchspender**

Artikelbeschreibung	Größe	Pack-Inhalt	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE
Feuchttuchspender	3 L	1 Spender	79643	4046153116430	10420068	1 Stück
Feuchttuchspender	5 L	1 Spender	79644	4046153116454	10420074	1 Stück

Hinweise: Auf dem beiliegenden Etikett sind folgende Eintragungen zu machen: Produktname des Desinfektionsmittels, die Chargennummer, Konzentration, Einwirkzeit, Datum der Befüllung sowie Haltbarkeitsdatum der Befüllung (max. 28 Tage). Das Etikett ist gut sichtbar auf dem Eimerdeckel oder an geeigneter Stelle anzubringen. Vor der erneuten Befüllung ist der MaiMed® MyClean S Feuchttuchspender vollständig zu reinigen und zu desinfizieren. Der Spender ist beständig gegenüber herkömmlichen Desinfektionsmitteln und bis 65 °C spülmaschinenfest. Produkt ist tierversuchsfrei.

eClass: **30-30-06-91**

Symbole:



 MaiMed GmbH
Robert-Koch-Str. 1-7
29643 Neuenkirchen - Germany
TD-MaiMed® MyClean-S-Feuchttuchspender-20170306